

# iridina®

## gocce lubrificanti

**SENZA CONSERVANTI**
**Idratazione a lunga durata**

Anche con lenti a contatto indossate

**Iridina® Gocce Lubrificanti** è una soluzione sterile per uso oftalmico con un pH fisiologico a base di sodio ialuronato. La soluzione è confezionata in pratici contenitori polidose da 10 ml, **senza conservanti**. Il sodio ialuronato conferisce al dispositivo medico proprietà mucomimetiche e visco-elastiche in modo da garantire un'adeguata lubrificazione della superficie oculare, proteggendola dall'attrito generato dai movimenti oculari. Inoltre, il polimero è in grado di trattenere l'acqua: per questo motivo la soluzione è in grado di mantenere umidificata la superficie oculare e aumentare la stabilità del film lacrimale, proteggendo la mucosa oculare dagli agenti esterni. La soluzione contiene acido bórico e sodio tetraborato decaidrato, come sistema tampone, e sodio cloruro così da garantire una soluzione fisiologica. Pertanto, **Iridina® Gocce Lubrificanti** svolge un'azione idratante e lubrificante per la superficie oculare e dà un temporaneo sollievo al bruciore, all'irritazione ed ai disagi correlati alla secchezza oculare. La concentrazione di sodio ialuronato allo 0,4% consente **una maggiore idratazione con un'azione prolungata nel tempo**. **Iridina® Gocce Lubrificanti** può esser utilizzato con lenti a contatto, senza necessità di rimuoverle. Il dispositivo può essere utilizzato dai bambini a seguito di consulto medico. Dotato di un innovativo sistema multi dose senza conservanti (OSD - Ophthalmic Squeeze Dispenser), **Iridina® Gocce Lubrificanti** unisce i benefici di una soluzione monodose, senza conservanti, alla praticità di un flacone multi dose.

### INDICAZIONI D'USO

**Iridina® Gocce Lubrificanti** idrata e lubrifica l'occhio ed è indicato per rinfrescare e dare sollievo alla mucosa irritata o nel caso vi siano disturbi da occhio secco. Le cause più comuni che determinano secchezza oculare e irritazione possono essere:


- uso di lenti a contatto per molte ore consecutive;
- motivi ambientali (aria condizionata, eccessiva esposizione alla radiazione solare, vento, fumo, inquinamento);
- occhio secco causato da eccessive ore di studio, da troppo ore di lavoro al pc, dalla sindrome dell'occhio secco;
- stress conseguente interventi di chirurgia oculare.

### ISTRUZIONI PER L'USO

**Il dispositivo medico è indicato anche per portatori di lenti a contatto.**

**Il dispositivo può essere utilizzato dai bambini a seguito di consulto medico.**

- Prima della prima somministrazione rimuovere il tamper-evident e rimuovere il tappo di protezione.
- In ragione delle caratteristiche intrinseche del flacone con erogatore per soluzioni senza conservanti, al progressivo svuotamento del flacone potrebbe essere necessario esercitare una pressione maggiore per consentire la fuoriuscita del prodotto.
- Instillare 1/2 gocce in ciascun occhio premendo leggermente il polidose.
- Dopo l'uso, richiudere immediatamente il flacone: **il contenuto può esser riutilizzato entro 6 mesi dalla prima apertura.**
- Indicato anche per uso frequente, più volte al giorno, in base al bisogno o alle indicazioni del medico. La visione può essere temporaneamente offuscata dopo la somministrazione del prodotto. Se l'effetto persiste o peggiora consultare il medico.

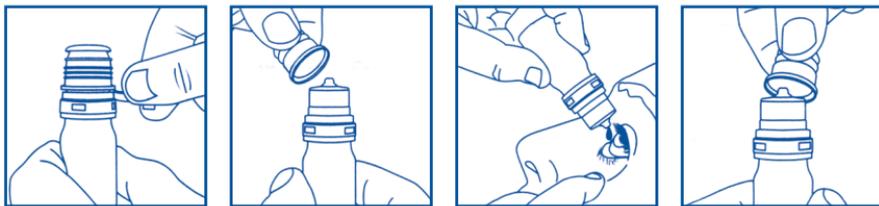

### COMPOSIZIONE

Sodio ialuronato 0,4%, acido bórico, sodio tetraborato decaidrato, sodio cloruro, acqua ppi.

**Non contiene conservanti.**

### AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.
- Il prodotto è monopaziente.
- Non utilizzare il prodotto se il confezionamento risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso.
- Durante l'applicazione non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità del flacone.
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione.
- In caso di effetti indesiderati, interrompere il trattamento e consultare un medico.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

### EFFETTI INDESIDERATI

Ad oggi non è noto alcun effetto indesiderato.

### CONFEZIONAMENTO

Flacone da 10 ml, senza conservanti.

### MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura inferiore a 30°C

Il contenuto del polidose può essere riutilizzato entro 6 mesi dalla prima apertura.

### VALIDITÀ

A confezionamento integro non superare la data di scadenza riportata sulla confezione.



Montefarmaco OTC SpA

Via IV Novembre, 92 - 20021 Bollate (MI)



0051

**DISPOSITIVO  
MEDICO**

**STERILE A**

Ultima revisione: 0 del 02/2019

029711190201

**M**ONTEFARMACO