

pumilene® respiro

Soluzione ipertonica utile nel trattamento di rinite acuta o rinosinusite. Promuove una rapida ed efficace rimozione del muco. Contrasta la secchezza nasale.

1. Identificazione, composizione e finalità di utilizzo del dispositivo medico

Pumilene Respiro Spray Nasale è un dispositivo medico decongestionante indicato come trattamento in presenza di processi infiammatori associati alla congestione nasale quali:

- raffreddore
- riniti di diversa origine (virali, batteriche o allergiche)
- rinosinusiti acute e croniche

I componenti dello spray nasale ipertonico Pumilene Respiro Spray Nasale favoriscono l'espulsione del muco in eccesso ed esercitano un'azione protettiva, emolliente e lenitiva sulla mucosa nasale irritata.

L'acqua di mare contenuta contribuisce all'idratazione della mucosa nasale irritata contrastando la fastidiosa sensazione di secchezza nasale associata all'eccesso di muco.

1.1 Meccanismo di Azione

L'acqua marina utilizzata nella formulazione aiuta a pulire le fosse nasali e ad allontanare polvere e pollini, l'acqua marina in forma ipertonica favorisce anche la clearance muco-ciliare e la fluidità del muco in eccesso promuovendone l'espulsione.

Le mucillagini di natura polisaccaridica contenute nel complesso BARRYMYRRH® esercitano un'azione fluidificante

Spray nasale

sul muco in eccesso facilitandone l'espulsione. Inoltre, i polisaccaridi contenuti in BARRYMYRRH® formano una barriera protettiva sulla mucosa nasale proteggendola dagli irritanti e da agenti esterni quali freddo, smog, polvere, polline e dalla penetrazione di microrganismi patogeni. Infine, l'ipertonicità della soluzione richiama acqua promuovendo la fisiologica idratazione dei tessuti nasali e contribuendo ulteriormente a fluidificare l'eccesso di secrezioni mucose.

1.2 Composizione

Complesso BARRYMYRRH®, acqua purificata, acqua di mare, gomma xantano, sodio metilparabene, polisorbato, pino mugo o.e., tea tree o.e., limone o.e..

2. Confezione

Flacone da 30 ml

3. Dosaggio e modalità di assunzione

Adulti e bambini > 6 anni: 1-2 nebulizzazioni per narice 3-4 volte al giorno.

Soffiarsi il naso prima della nebulizzazione. Spruzzare la soluzione in ogni narice, tenendo la testa in posizione verticale. Dopo la nebulizzazione, premere leggermente col dito indice sulla narice, al fine di assicurare una ripartizione della soluzione sull'intera mucosa nasale. Un leggero e temporaneo pizzicore in seguito all'applicazione è da considerarsi una normale azione del prodotto. Dopo l'uso, sciacquare l'erogatore con acqua calda e asciugarlo con un fazzolettino di carta.

4. Controindicazioni ed effetti Indesiderati

Non sono attualmente conosciuti effetti collaterali e controindicazioni specifiche per l'utilizzo dei componenti contenuti in Pumilene Respiro Spray Nasale. La mirra e gli oli essenziali possono causare allergie in soggetti predisposti, con comparsa di dermatiti e rash cutanei di moderata entità.

In caso di comparsa di effetti collaterali inattesi, sospendere l'utilizzo del prodotto e consultare il medico. In gravidanza o allattamento si consiglia di consultare il proprio medico prima di utilizzare il dispositivo medico.

5. Interazioni con Farmaci

L'olio di mirra e l'aloè (complesso BARRYMYRRH®) possono interagire con l'attività di farmaci antidiabetici, della digossina, della quale potrebbe potenziare l'attività cardiaca, e con la warfarina, causando eccessiva diminuzione della coagulazione sanguigna. In questi casi, e in generale quando si assumessero farmaci salvavita, è sempre necessario consultare il medico prima di utilizzare il prodotto.

6. Modalità di conservazione

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperature comprese tra 15°C e 25°C in un luogo asciutto, lontano da fonti di luce diretta e dall'umidità.

7. Avvertenze e Controindicazioni

Non utilizzare il prodotto al di sotto dei 6 anni. Prima dell'uso del prodotto nei bambini consultare il medico. Assumere il prodotto in gravidanza o allattamento solo su consiglio medico. Si consiglia di non superare il dosaggio indicato in quanto potrebbero insorgere effetti collaterali avversi. Non utilizzare per più di 30 giorni consecutivi, se i

sintomi persistono consultare il medico. Non assumere in caso di intolleranza al prodotto. Non assumere in caso di ipersensibilità nota ai componenti del prodotto come alla mirra e all'aloè. Dopo ciascun utilizzo, sciacquare l'erogatore con acqua calda ed asciugare con un fazzoletto di carta.

8. Scadenza

Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.

9. Smaltimento

Il dispositivo scaduto o comunque da eliminare deve essere gestito come da regolamento di gestione dei rifiuti dell'Ente Gestore Locale. Non disperdere in nessun caso il prodotto o la sua confezione nell'ambiente

Data Ultima Revisione: Luglio 2021

La Tua opinione è importante! Al fine di valutare la Tua soddisfazione per il prodotto, dedica 5 minuti per compilare il breve questionario che trovi al seguente indirizzo, www.siiit-pms.com/pumilene o scansionando questo QR code.



SCAN ME



0426

DISPOSITIVO
MEDICO



SIIIT srl
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano S/N (MI)

Distributore:
MONTEFARMACO OTC SpA
Via IV Novembre, 92
20021 Bollate (MI)